




PRP - schnell, einfach, sicher



1.

- Blut in (A) ziehen
- Mit steriler Kappe verschließen
- 10 mal invertieren, Stempel abbrechen

VORSICHT! Einstellungen der Bremse: langsam oder aus

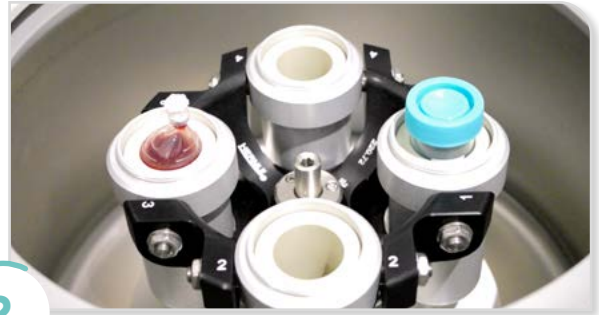

2.

- Gegengewicht mit 40 mL Wasser füllen
- (A) gegenüber dem Gegengewicht in Zentrifuge platzieren
- 3 Min. bei 900 g (RCF) zentrifugieren



3.

- (B) mit (A) über Luer Luer Adapter verbinden
- (A) mir der zulaufenden Seite in die Druckhilfe drücken
- Plasma in (B) aufziehen, bis zur Markierung 1
- Sterifix Filter auf (B) setzen und komplett aufziehen



4.

- (B) mit steriler Kappe verschließen, Stempel abbrechen
- Volumen des Gegengewichts an (B) angleichen
- (B) gegenüber dem Gegengewicht in Zentrifuge platzieren
- 10 Min. bei 1300 g (RCF) zentrifugieren



5.

- (B) mit 30 mL-Spritze verbinden
- (B) mir der zulaufenden Seite in die Druckhilfe drücken
- PPP in 30 mL-Spritze bis Markierung 4 aufziehen
- 30-mL-Spritze gegen 10-mL-Spritze austauschen



6.

- Sterile Luft aus 10 mL Spritze in (B) überführen
- System 1 Minute schütteln und PRP aufziehen
- Stempel der 10 mL Spritze fixieren und (B) abdrehen
- 10 mL-Spritze bis zur Verwendung verschließen